

Mantenimiento Roland DGSHAPE DWX-4W y DWX-42W

Tiempo de mantenimiento	Mantenimiento
Antes de las operaciones diarias	Spindle run in (corto)
Despues de las operaciones diarias	Mantenimiento de collet Comprobación de flujo de refrigerante Limpieza del interior de la máquina Limpieza del dummy pin
Cada 8 horas de operación del Spindle	Añadir Chelante
Semanalmente	Reemplazar liquido de tanque refrigerante Limpieza de boquillas de refrigerante
Cada 20 horas de operación del spindle	Cambio de filtros
Spindle excede 1500 hora de uso	Reemplazo de spindle