


Reemplazo de refrigerante Roland DGSHAPE DWX-42W y 4W

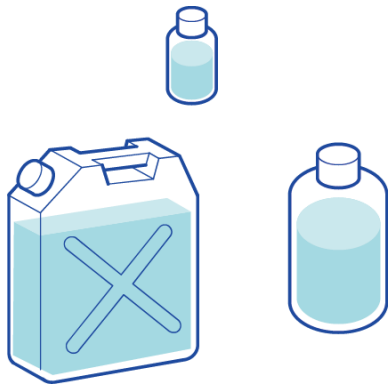

Agua destilada
Aditivo ZAW-1000
Chelante ZCH100D

Cantidad consumida

	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Consumo
Aditivo	250ml	250ml (500ml)	250ml (750ml)	250ml (1000ml)	1000ml
Chelante	12,5ml	12,5ml (25ml)	12,5ml (37,5ml)	12,5ml (50ml)	50ml
Agua destilada	4750ml	4750ml (9500ml)	4750ml (14250ml)	4750ml (19000ml)	19L

En los siguientes casos se deben añadir 12.5ml de chelante:

- Cuando se acumula polvo de fresado dentro de la máquina
- Cuando el tiempo de fresado excede las 8 horas, independientemente del estado de adhesión del polvo de fresado

El refrigerante se reemplaza siempre cuando se reemplaza el filtro